

de Paste

Füllt Hautunebenheiten/Falten auf

Stomaversorgung

**Gebrauchsanleitung**

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

23341160 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten. © 2022-02-16

Verwendungszweck

Die Brava Paste ist für das Auffüllen von Vertiefungen/Falten in der intakten Haut um das Stoma bestimmt. Auf diese Weise wird für eine Abdichtung zwischen Stoma und Stoma-Basisplatte sowie für einen Schutz vor Stomaausscheidungen gesorgt.

Vorsichtshinweise

Dieses Produkt ist unsteril und sollte bei Frühgeborenen oder Säuglingen, die im Inkubator gepflegt werden, mit Vorsicht verwendet werden, da es zu einem erhöhten Infektionsrisiko führen kann.

Das Produkt enthält Alkohol und darf nicht direkt auf eine offene Wunde oder ein Hautgeschwür aufgebracht werden. Bei Anwendung auf irritativer oder abgeschürfter Haut kann ein kurzes brennendes Gefühl auftreten. Wenden Sie sich an eine medizinische Fachkraft, wenn eine Hautirritation auftritt und bestehen bleibt.

Vor direktem Sonnenlicht schützen.

Produkte kühl und trocken lagern – nicht einfrieren. Die Produkte vor Gebrauch Raumtemperatur erreichen lassen.

Nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt.

Information


Coloplast übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

Anwendung**Vorbereiten**


Um eine Kontamination der Paste zu vermeiden:

- Halten Sie die Tube von Wasser fern und vermeiden Sie den Kontakt zwischen der Tube und dem Stoma.
- Waschen Sie Ihre Hände vor und nach Auftragen der Paste mit Wasser und Seife.


Vor dem Anbringen der Paste ist sicherzustellen, dass die Haut um das Stoma herum sauber und trocken ist.

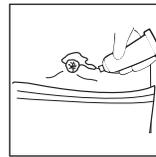Applizieren

Die Paste kann direkt aus der Tube auf die Haut aufgetragen werden, um tiefe Hautfalten, Narben oder unebene Oberflächen auszugleichen. Die Paste nicht auf den gesamten von dem Hautschutz der Stomaversorgung abgedeckten Teil der Haut auftragen. Sie kann auch direkt auf den Hautschutz/die Basisplatte aufgetragen werden.

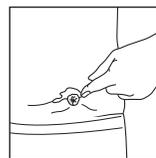

Falls erforderlich, die Paste mit einem angefeuchteten Finger oder einem Spatel glattstreichen.

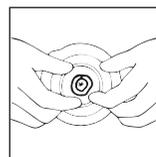

Nach Anbringen der Basisplatte/des Hautschutzes drücken Sie die Basisplatte/den Hautschutz mit Ihren Fingern vollständig an, um einen perfekten Sitz um das Stoma herum zu gewährleisten.

Nach Gebrauch die restliche Paste mit einem sauberen Tuch von der Tube entfernen. Die Tube wieder fest verschließen, um Kontakt mit Feuchtigkeit zu vermeiden.

Entfernen

Die Paste kann einfach mit handwarmem Wasser und einem Waschlappen entfernt werden. Es kann ein öliger Rückstand der Paste auf der Haut zurückbleiben, wenn die nächste Versorgung angewendet wird. Es ist besser, einen kleinen Rest der Paste auf der Haut zu belassen, als eine Hautreizung durch Abreiben aller Rückstände zu verursachen.

Entsorgung

Das Produkt sollte mit dem normalen Hausmüll oder gemäß den örtlichen Richtlinien entsorgt werden.

Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

Meldung von Zwischenfällen

Wenn es während oder infolge der Anwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Zwischenfall kommt, melden Sie dies bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Landes.

Erläuterung der Symbole



Medizinprodukt



Zeigt an, dass das Produkt der europäischen Gesetzgebung für Medizinprodukte entspricht



Katalognummer



Verfalldatum (JJJJ-MM-TT)



Chargennummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten



Zeigt einen Datenträger mit einer einheitlichen Produktkennzeichnung für Medizinprodukte an



(Global Trade Item Number) Globale Artikelidentnummer



Vor direktem Sonnenlicht schützen



Wiederverwertbare Packung