



Anwendungshinweise

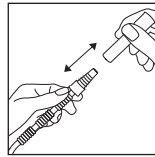

Führen Sie die Schlauchspitze des Urinbeutels in eines der Enden des Konnektors ein und schieben Sie diese bis zum Anschlag weiter. Stellen Sie sicher, dass der Konnektor fest mit dem Schlauch verbunden ist.

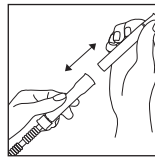

Führen Sie die Rückseite des SpeediCath Compact Katheters in das andere Ende des Konnektors ein, bis der Konnektor fest mit dem Katheter verbunden ist. Der Schlauch des Urinbeutels darf nicht abgeknickt sein, damit der Urin ungehindert abfließen kann. Der SpeediCath Compact Katheter muss in sitzender oder lie-gender Position angewendet werden.

Bereiten Sie nun den SpeediCath Compact Katheter zum gebrauch vor. Schauen Sie dazu in die Gebrauchsanweisung des SpeediCath Compact Katheters und folgen Sie den dort angegebenen Schritten.

Nach dem Entleeren der Blase, können Sie den Katheter und Konnektor im Hausmüll entsorgen.

Entsorgung

Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und sollte im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

Meldung von Vorkommnissen

Falls während der bzw. durch die Anwendung dieses Produkts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dieses bitte dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde.

Symbolerklärung



Medizinprodukt



Einhaltung der europäischen Bestimmungen für Medizinprodukte



Katalognummer



Verfalldatum (JJJJ-MM-TT)



Chargennummer / LOT-Nummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Gebrauchsanweisung befolgen



Nur für den einmaligen Gebrauch



Weist auf einen Träger mit Informationen zur einmaligen Produktkennung hin



(Global Trade Item Number) Globale Artikelnummer



Vor Sonnenlicht schützen



Hier oben



Recyclingfähige Verpackung



Coloplast A/S
Hofledam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
23327464 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S.
Alle Rechte vorbehalten. © 2021-04-21

Verwendungszweck

Der SpeediCath® Compact Katheter-Konnektor ermöglicht den Anschluss des SpeediCath® Compact Katheters an einen Standard-Urinbeutel.

Warnhinweise

Eine Wiederverwendung dieses Einwegprodukts wird nicht empfohlen, da eine Kreuzkontamination auftreten kann, die möglicherweise zu einer lokalen Entzündung führt.

Die Wiederaufbereitung, Reinigung, Desinfektion, und/oder (Re-)Sterilisation können die Produktmerkmale beeinträchtigen und dadurch ein zusätzliches Risiko einer körperlichen Schädigung oder Infektion des Anwenders darstellen.

Informationen

Coloplast übernimmt keine Haftung für jegliche Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.