FasiCath®



Katheter mit angeschlossenem Beutel zur intermittierenden Katheterisierung.

Verwendung des EasiCath Katheters mit integriertem Beutel



Desinfizieren Sie sich zunächst Ihre Hände und den Bereich um den Harnröhreneingang. Es ist wichtig, die Übertragung von Bakterien von Ihren Händen auf den Katheter zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Verpackung, und nehmen Sie den Beutel heraus. Brechen Sie die Ampulle auf, und drücken Sie die sterile Kochsalzlösung in den Beutel. Halten Sie dabei den Beutel mit dem Katheter nach unten.



MIN. 30 SEC.

2. Warten Sie mindestens 30 Sekunden, damit die Beschichtung des Katheters aktiviert wird.



Gebrauchsanweisung

23330806 Version 2

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten.© 2023-07-13



3. Drehen Sie den Beutel um und öffnen Sie ihn, indem Sie das Ende an der vorgestanzten Stelle abtrennen.



4. Führen Sie den Katheter in die Harnröhre ein, indem Sie ihn vorsichtig aus dem Beutel schieben. Schieben Sie ihn so lange weiter, bis Urin fließt. Sobald der Urinfluss aufhört, ziehen Sie den Katheter vorsichtig 2 bis 3 cm heraus. Wenn der Urin wieder zu fließen beginnt, warten Sie ein paar Sekunden, bevor Sie den Katheter weitere 1 bis 2 cm herausziehen. Wenn die Harnblase leer ist, entfernen Sie den Katheter langsam aus der Harnröhre und schieben ihn zurück in den Beutel.



5. Knoten Sie das Ende des Beutels zu.





6. Öffnen Sie den Beutel am unteren Ende, entleeren Sie ihn und werfen Sie ihn dann in den Mülleimer

dieses Produkts entstehen.

Achtung Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

Katheter nach dem Entleeren der Harnblase

Wenden Sie sich an das medizinische Fachpersonal, bevor Sie zum ersten Mal eine Selbstkatheterisierung durchführen.

Coloplast schließt jede Haftung für Verletzungen oder Schäden aus, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung

Wenden Sie sich an das medizinische Fachpersonal, wenn:

Steriler Blasenkatheter zur intermittierenden Katheterisierung.

 Sie Symptome wie Fieber, Beschwerden beim Wasserlassen, häufigen Harndrang oder Blut im Urin haben.

Führen Sie die Katheterisierung ohne unnötige Verzögerung durch, und entfernen Sie den

Warnhinweis

Die Wiederverwendung dieses Einmalprodukts kann ein potenzielles Risiko für den Anwender darstellen. Wiederaufbereitung, Reinigung, Desinfektion und Resterilisation können die Produktmerkmale beeinträchtigen und somit ein zusätzliches Risiko einer körperlichen Schädigung oder Infektion des Anwenders darstellen.

Dieses Produkt enthält Weichmacher (Phthalate) und sollte von Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen nur nach Rücksprache mit medizinischem Fachpersonal verwendet werden





DEHP DBP

Enthält Phthalate (Weichmacher) oder Spuren davon: Kombination aus Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) und Dibutylphthalat (DBP)



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.